

Research Use Only

# ASSURE<sup>®</sup> SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test (RUO)

Cat. No. 0743142020

39,000 円 / 20 tests

シンガポール弊社自社工場生産、安定供給可能です。



抗 SARS-CoV-2 IgG 及び IgM 抗体を  
迅速・簡便に検出します。



感染の急性期から回復期の段階での  
抗体検出が可能です。



サンプル：ヒトの血清、血漿、指先  
穿刺血、全血(抗凝固剤含) 10 $\mu$ L



判定時間：15 分




### 【使用上の制限】

- 本製品は研究用に限定して販売しております。
- 本製品は、ヒトの血清、血漿、指先穿刺血、全血(抗凝固剤含)中の SARS-CoV-2 に対する IgM/IgG 抗体を検出および区別する定性的な in vitro 免疫クロマトグラフィーテストです。
- 本製品の陽性結果は、SARS-CoV-2 感染の可能性を示しますが、感染の判定については他の判定方法と併せて総合的にご判断ください。
- 本製品の陰性結果は、SARS-CoV-2 による感染の可能性を排除するものではありません。


# ASSURE<sup>®</sup> SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test (RUO)

ASSURE<sup>®</sup> SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test (RUO) は、ヒト血清、血漿、指先穿刺血及び全血(抗凝固剤含)中の SARS-CoV-2 に対する IgG/IgM 抗体を検出し識別することを目的とした、定性的 in vitro 免疫クロマトグラフィーテストです。

この血清学的な判定法は、特定コミュニティでの COVID-19 感染率の把握や、COVID-19 感染に対し免疫を有する個人特定などの重要なツールとなります。

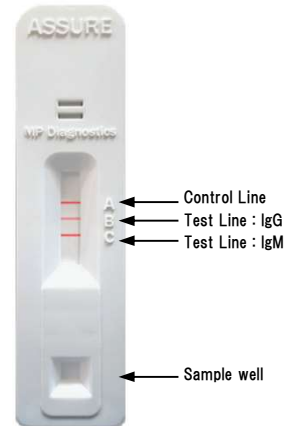


## Simple Assay Procedure

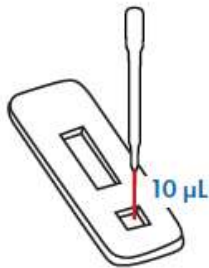

**1** キャピラリーピペットを用い Sample Well にヒト血清/血漿/指先穿刺血、全血(抗凝固剤含)サンプル 10µL を滴下する。



**2** Sample Well に Chase Buffer 3 滴を滴下する。

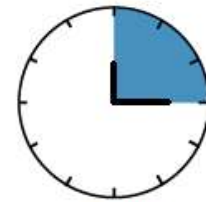

15 mins

**3** 15 分静置後、結果を判定する。

Cat.No.	Product Name	Size	Price
0743142020	ASSURE <sup>®</sup> SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test (RUO)	20 Tests	39,000円

### Kit Components

- ASSURE<sup>®</sup> SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test : 20 devices
- Capillary Pipette : 20 pieces
- Chase Buffer : 1 bottle (5mL)
- Instruction for Use : 1 copy



分析感度  
100%

分析特異性  
99.41%

正確度  
99.43%

診断感度  
96%  
(評価継続中)

診断特異性  
100%  
(評価継続中)

Promo code J-20200911-1



株式会社エムピーバイオジャパン

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目7-14  
セブンビル4階

TEL : 03-6667-0730 FAX : 03-6667-0733

E-mail : custserv.jp@mpbio.com

URL : www.mpbio.co.jp